


TRITURADOR RX CRUSH by Tacklen Medical

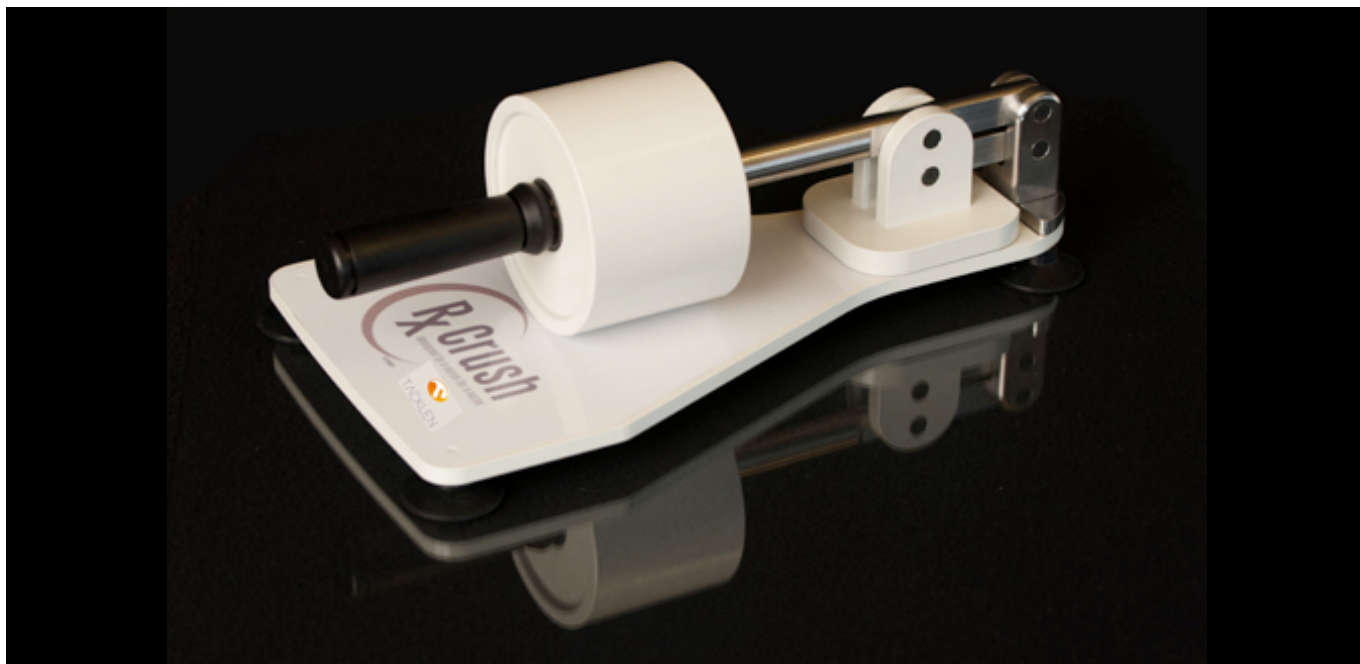

EL TRITURADOR DE MEDICACION PELIGROSA MAS SEGURO DEL MERCADO

RX CRUSH by Tacklen Medical es el sistema de trituración de comprimidos seguro y sellado que pulveriza los comprimidos a través de sus bolsas patentadas con conexión enfit y cumpliendo la normativa de la Joint Comision (JCAHO).

RX CRUSH nace de la necesidad de minimizar la incidencia de los accidentes relacionados con el manejo de medicamentos peligrosos. Se han establecido directrices dirigidas a implantar medidas de seguridad para el trabajador durante el manejo de medicamentos peligrosos en el entorno hospitalario.

La trituración de medicamentos y métodos de administración actual, lleva a una posible obstrucción de los tubos por una inadecuada pulverización de la medicación y la exposición del personal sanitario al polvo de los medicamentos peligrosos. (Normativa USP 800)

El sistema de trituración de RX CRUSH pulveriza los comprimidos a través de su acción de aplastamiento. Junto con nuestras bolsas patentadas, son las únicas que conectan a las jeringuillas enfit de alimentación oral enteral. Los medicamentos disueltos son enviados rápi-

damente y evitando la exposición de los mismos y con pérdidas mínimas de medicación.

RX CRUSH es fácil y versátil, sin riesgo de exposición, sin pérdida de medicación, sin errores.

Disponemos de complementos y adaptadores que cubren todas las necesidades:

Adaptador Enfit hembra a adaptador Oral hembra

Adaptador Enfit hembra a adaptador LUER LOCK hembra.

Tapón Hembra Enfit sin ventilación.

El triturador RX CRUSH así como sus bolsas patentadas con conexión EN FIT se adapta perfectamente a la Resolución de la Comunidad de Madrid 51/2018 donde se dictan las instrucciones para la manipulación de Medicamentos Peligrosos, RX Crush by Tacklen es uno de los productos recomendados por el Informe del Grupo de Trabajo de Medicamentos Peligrosos de La Unió i el CSSC de Catalunya, que agrupa gran parte de los Hospitales de Catalunya.



TACKLEN

www.tacklen.com



SIN PERDIDAS DE
MEDICACIÓN



SIN RIESGO DE
EXPOSICIÓN



SIN ERRORES

RX CRUSH®

EL TRITURADOR DE MEDICAMENTOS MÁS SEGURO DEL MERCADO



sistema sellado



Bolsa de 50 ml adaptada
a Jeringuilla ENFit®

www.medicacionpeligrosa.com

SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SANITARIO

El sistema de trituración de comprimidos **RX CRUSH®** es un sistema sellado que pulveriza los comprimidos a través de su acción patentada de aplastamiento y trituración.

¿COMO FUNCIONA RX CRUSH?

1 Inserte los comprimidos
en la bolsa sellada.

1

2 Conecte una jeringa llena
de solución al conector
ENFit® de la bolsa.

2

3 Aplastar y pulverizar
con el rodillo
el comprimido.

3



Repita los pasos 4 y 5
tantas veces como sea
necesario para eliminar toda
la medicación de la bolsa.

4

4 Inyectar la solución de la
jeringa en la bolsa y agitar
para disolver la medicación.

5

5 Retirar la solución
del medicamento
en una jeringa.

6

6 Desconecte la jeringa
de la bolsa e inserte el medica-
mento en el tubo enteral.

BENEFICIOS

Fácil uso

Los medicamentos disueltos se envían rápida y fácilmente a los tubos de alimentación de las bolsas compatibles con ENFit®.

Efectivo

Se elimina la obstrucción de los tubos de alimentación por una mala trituración de los comprimidos eliminado el riesgo de exposición a los medicamentos del personal sanitario.

Versátil

La nueva punta ENFit-tip previene las conexiones erróneas con otras aplicaciones clínicas (Normativa GEDSA e ISO 80369-3).

Sistema patentado

Nuestras bolsas patentadas son las únicas que se conectan a las jeringas ENFit® de alimentación enteral.

Seguro

Sistema sellado que protege al personal sanitario que manipula medicamentos de la peligrosa exposición a los mismos (Normativa USP 800).



video disponible : www.tacklen.com

TACKLEN



Avda. del Parlament, 30 · 08225 Terrassa · Tel.+34 937 888 568 | comercial@tacklen.com · tacklen.com