



TACKLEN



FJORDBLINK®
BAÑERA DE DILATACIÓN Y
PARTO

HERRAMIENTA DE TRABAJO PROFESIONAL

Es importante que el profesional sanitario se sienta cómodo con los productos que utiliza durante el parto tanto para ofrecer alivio del dolor al paciente como para asistir al parto en el agua.

Después de 25 años de especialización en la producción de bañeras, Fjordblink ha creado una elegante bañera de parto en colaboración con matronas internacionales con el objetivo de crear una herramienta de trabajo óptima para la sala de maternidad/clínica de maternidad profesional.

La bañera **Fjordblink** ha sido elaborada basada en la comodidad, la ergonomía, la flexibilidad, la movilidad y la seguridad en la sala de maternidad o clínica.

Fabricadas y montadas a mano en Dinamarca, cumplen con la normativa de calidad EN ISO:13485 para productos sanitarios, garantía de que cumple con los requisitos detallados de seguridad y calidad.



BENEFICIOS FJORDBLINK®




Alivio de los dolores

La bañera de partos permite a la persona que da a luz aliviarse, moverse, descansar y relajarse durante las fases del parto.



Comodidad para el personal sanitario

- Sistema de elevación/descenso silencioso para ajustar la altura a la posición de trabajo óptima sin escalonamientos para evitar posiciones de asistencia incómodas y estresantes cuando se trabaja alrededor de la bañera.
- Bordes redondeados para mayor comodidad en el apoyo del profesional
- Gran estabilidad para asegurar la seguridad y comodidad del personal sanitario
- Paneles laterales que rodean la bañera de parto especialmente diseñados para dejar espacio para las rodillas y los pies.
- Si la Columna de Suministro se monta libremente en el centro de una habitación da un movimiento de 360 grados sin obstáculos alrededor de la bañera.

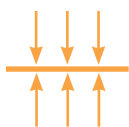

Diseño óptimo

La bañera de partos invita a alternar posiciones cómodas de descanso y/o nacimiento. Las superficies integradas para sentarse y descansar, así como los reposapiés y la base antideslizante, sirven además para apoyar y reconfortar a la persona que da a luz. La persona que da a luz puede tumbarse, sentarse, ponerse en cuclillas o arrodillarse.

Dinamismo

Las bañeras de partos FJORDBLINK® tienen ruedas incorporadas que se activan en el panel de control de la columna de suministro o mediante el mando a distancia. Esto le da flexibilidad en la sala de partos. Las ruedas se retraen cuando la bañera está en uso. Esto hace que sea completamente estable en el suelo cuando se trabaja alrededor de la piscina.

El hecho de que pueda empujar la bañera de parto hacia un lado también facilita la limpieza.




Flexibilidad

Se puede instalar una columna de suministro en varias salas de parto y compartir la bañera por éstas. La piscina se desconecta fácilmente de la columna de suministro y drenaje, por lo tanto, se puede mover de una habitación a otra fácilmente.

COLUMNA DE SUMINISTRO

La Columna de Suministro asociada a la bañera de partos suministra agua y electricidad. También actúa como estación de acoplamiento de la bañera de partos, ya que se pueden manejar todas las funciones de la bañera desde la columna de suministro.

El agua y la electricidad se pueden suministrar mediante la columna de suministro a través del suelo o de la pared. El drenaje puede realizarse a través de la columna de suministro o puede colocarse externamente bajo la piscina de partos.

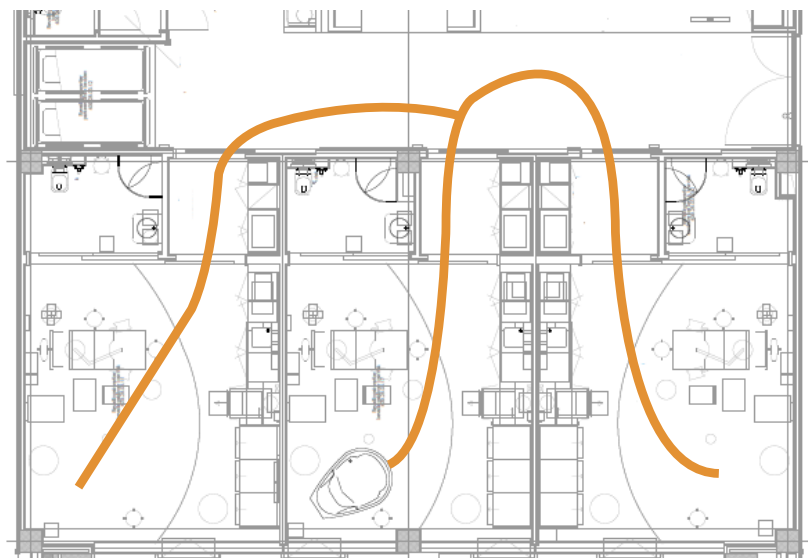

Funciones :

- Sistema de drenaje abierto/cerrado
- Llenado de agua
- Función de ducha
- Ajuste de la temperatura
- Ajuste de la presión del agua
- Activar el sistema de elevación/descenso
- Activación de las ruedas/ruedas



"AQUADURAL" - EL TÉRMINO PARA EL EFECTO ANALGÉSICO Y EL EFECTO BENEFICIOSO DEL AGUA

Parto en el agua o alivio de los dolores de parto en el agua



La bañera de partos permite a la persona que da a luz aliviarse, moverse, descansar y relajarse durante las fases del parto. Investigaciones recientes concluyen una vez más que un parto en el agua es seguro para la persona que da a luz y para el bebé. La investigación también destaca que los partos en el agua contribuyen a mejorar la experiencia del parto. En Fjordblink, damos la bienvenida a las buenas experiencias de parto en el agua, y por eso encontrarás "Welcoming Water" en nuestro logotipo.

Una herramienta profesional cuyo diseño también optimiza su área de trabajo

La asistencia alrededor de una bañera de partos puede ser un reto para la ergonomía del profesional sanitario. Hemos resuelto este problema instalando un sistema de elevación/descenso silencioso en la bañera de partos, para que pueda ajustar la altura a su posición de trabajo óptima sin escalonamientos. Una solución FJORDBLINK® desarrollada para evitar posiciones de asistencia incómodas y estresantes cuando se trabaja alrededor de la bañera.



Los bordes redondeados de la bañera de nacimiento hacen que sea cómodo apoyarse en el borde.

La estabilidad de la bañera hace que sea seguro y cómodo apoyarse en ella.



Los paneles laterales que rodean la bañera de parto están especialmente diseñados para dejar espacio para las rodillas y los pies.

Si la Columna de Suministro se monta libremente en el centro de una habitación, esto le da un movimiento de 360 grados sin obstáculos alrededor de la bañera de Nacimiento.



UN DISEÑO BIEN PENSADO QUE PROPORCIONA MAYOR COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD

La amplitud de la bañera es lo más importante

La bañera de partos debe invitar a alternar posiciones cómodas de descanso y/o nacimiento. Las superficies integradas para sentarse y descansar, así como los reposapiés y la base antideslizante, sirven además para apoyar y reconfortar a la persona que da a luz.

La persona que da a luz es libre de elegir si se tumba, se sienta, se pone en cuclillas o se arrodilla.



GRANDE O PEQUEÑA

- ¿QUÉ MEDIDA ES LA ADECUADA?

Las bañeras de nacimiento FJORDBLINK® están disponibles en dos tamaños

El modelo MILIEU es nuestra bañera grande y el modelo COMFORT es nuestra bañera pequeña. Mismo diseño y confort, sólo un 15% de diferencia entre las dimensiones.

Como la bañera de nacimiento es móvil, puede ofrecer el tamaño de bañera de nacimiento que mejor se adapte a la persona que va a dar a luz en ese momento. Las ruedas de la bañera de nacimiento hacen posible rodar la bañera de nacimiento de tamaño específico que usted necesita en la habitación.



Dimensiones Bañeras parto

	Modelo MILIEU/Grande	Model COMFORT/Pequeña
Anchura exterior	1.970 mm	1.700 mm
longitud interior	1.130 mm	995 mm
Anchura interior	1.820 mm	1.550 mm
Profundidad del agua	1.010 mm	850 mm
Ajuste mínimo	570 mm	510 mm
Ajuste máximo	520 mm	445 mm

Peso Bañera Parto

	166 kg	152 kg
	Ca. 520 L = 686 kg	Ca. 310 L = 462 kg

BAÑERA DE PARTOS DINÁMICA SOBRE RUEDAS- ERGONOMÍA ABSOLUTA

Transforme la sala de partos para su propósito actual

Ahora no tiene que explicar a una persona que va a dar a luz que es imposible acceder a una bañera de partos porque otra persona está utilizando la misma sala de partos donde hay una Bañera de Partos fija. Sólo tiene que coger el tamaño de la bañera de partos que necesite y llevarla a la sala.

Si necesita utilizar el espacio del suelo de la sala de partos para otros fines, puede simplemente mover la bañera de nacimiento a la pared o fuera de la sala de partos. El hecho de que pueda empujar la bañera de parto hacia un lado también facilita la limpieza.


Las bañeras de partos FJORDBLINK® tienen ruedas incorporadas que se activan en el panel de control de la columna de suministro o mediante el mando a distancia. Esto le da flexibilidad en la sala de partos. Las ruedas se retraen cuando la bañera está en uso. Esto hace que sea completamente estable en el suelo cuando se trabaja alrededor de la piscina.



Si la bañera de partos se va a mover/reubicar de una habitación a otra, la apertura de la puerta debe tener una dimensión interna en el marco de la puerta de al menos 1.200 mm - entonces ambos tamaños de la bañera de nacimiento caben a través de la apertura de la puerta.

UNA BAÑERA DE PARTOS PUEDE DAR SERVICIO A VARIAS HABITACIONES

La opción práctica sobre ruedas

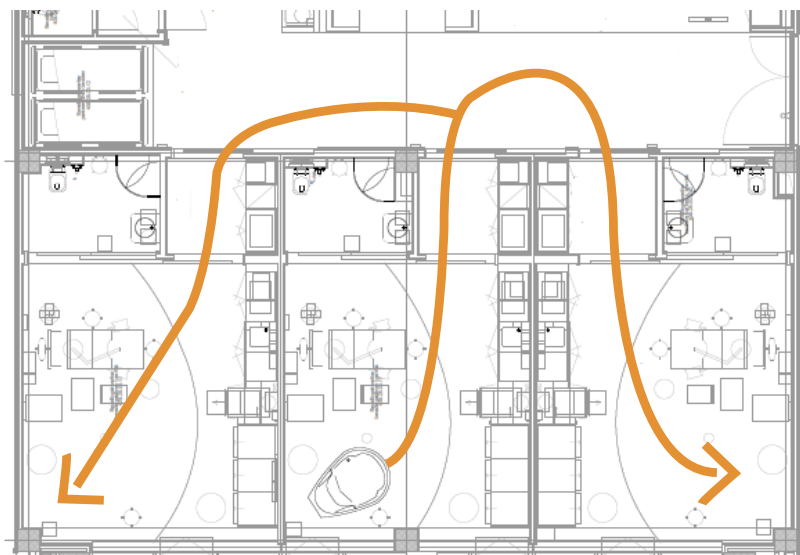

Esto requiere que haya instalado una columna de suministro FJORDBLINK® en la sala de partos. Actúa como una estación de acoplamiento para la piscina de nacimiento. La estación de acoplamiento suministra electricidad y agua a la Bañera de Partos. Puede optar por instalar una columna de suministro en varias salas de parto que comparten una piscina de nacimiento. La piscina para nacimientos se desconecta fácilmente de la columna de suministro y el drenaje y, por lo tanto, se puede mover de una habitación a otra. Ponga la piscina sobre ruedas y llévela exactamente donde la necesite.

LA COLUMNA DE SUMINISTRO ES LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE LA BAÑERA DE PARTOS

Una solución de producto única y moderna que resuelve varios retos

La Columna de Suministro asociada suministra agua y electricidad a la Bañera de Partos. También actúa como estación de acoplamiento de la bañera de partos, ya que puede manejar todas las funciones de la bañera de nacimiento desde la columna de suministro.

La Columna de Suministro está disponible en 3 modelos, por lo que se puede optimizar la posición de la bañera en la habitación. El agua y la electricidad se pueden suministrar a la columna de suministro a través del suelo o de la pared. El drenaje puede realizarse a través de la columna de suministro o puede colocarse externamente bajo la piscina de nacimiento.

Funciones de funcionamiento de la columna de suministro:

- Sistema de drenaje abierto/ cerrado
- Llenado de agua
- Función de ducha
- Ajuste de la temperatura
- Ajuste de la presión del agua
- Activar el sistema de elevación/ descenso
- Activación de las ruedas/ruedas



3 MODELOS DE COLUMNAS DE SUMINISTRO- IGUALES PERO DIFERENTES

Hemos pensado en un sistema flexible de columnas de suministro para que pueda diseñar la sala de partos de acuerdo con sus necesidades actuales e individuales

Ofrecemos 3 modelos:

- ✓ El modelo "Stand-alone" se monta en el centro de la habitación.
- ✓ El modelo "Wall mounted" se monta contra la pared.
- ✓ El modelo "Wall hung" se puede colgar en la pared.



Wall mounted

Wall hung

Stand alone

Por ejemplo, puede colocar la Columna de Suministro sobre o contra una pared y llevar la bañera de Nacimiento a una esquina o dejarla paralela a la Columna de Suministro.

También puede colocar la Columna de Suministro libremente en la habitación, asegurando 360 grados de libertad de movimiento alrededor de la Piscina de Nacimiento. Casi no hay límites.



A la hora de elegir la ubicación de la piscina de nacimiento, hay que tener en cuenta cómo se quiere gestionar cualquier situación de evacuación. La seguridad alrededor de la piscina de nacimiento también requiere espacio. Por lo tanto, coloque la piscina de nacimiento con el extremo de la cabeza apuntando hacia la habitación para que una cama/camilla pueda ser colocada contra el deslizamiento/respaldo de la piscina de nacimiento.

EVACUACIÓN SEGURIDAD

Cuando hay que actuar con urgencia

Afortunadamente, la gran mayoría de los partos se producen sin complicaciones. La mayoría de las personas que dan a luz podrán ayudar activamente a salir de la bañera si surgen complicaciones durante el parto. En caso de que se produzca una emergencia repentina y tenga que evacuar a la persona en trabajo de parto de la bañera, la hemos diseñado para que la situación sea más segura para usted.

Utilizando la parte trasera de la bañera de parto como tobogán, dos personas pueden tirar de la persona que va a dar a luz hacia arriba y hacia una cama situada en la cabecera de la bañera de parto.

El efecto de deslizamiento y la flotabilidad del agua ayudan a que esta maniobra resulte sorprendentemente fácil. Si el espacio es limitado en la sala de partos, también se puede salir por el lateral de la bañera.


Los bordes redondeados de la bañera no dañan a la persona durante la evacuación.

Puede evacuar a una persona de la bañera de nacimiento inmediatamente si es necesario.

No vacíe la bañera. La propiedad del agua ayuda al proceso y supone un ahorro de tiempo cuando la persona es arrastrada a una cama.

También puede utilizar una red de evacuación, una camilla o una grúa.

Llama a tus compañeros para que te apoyen.

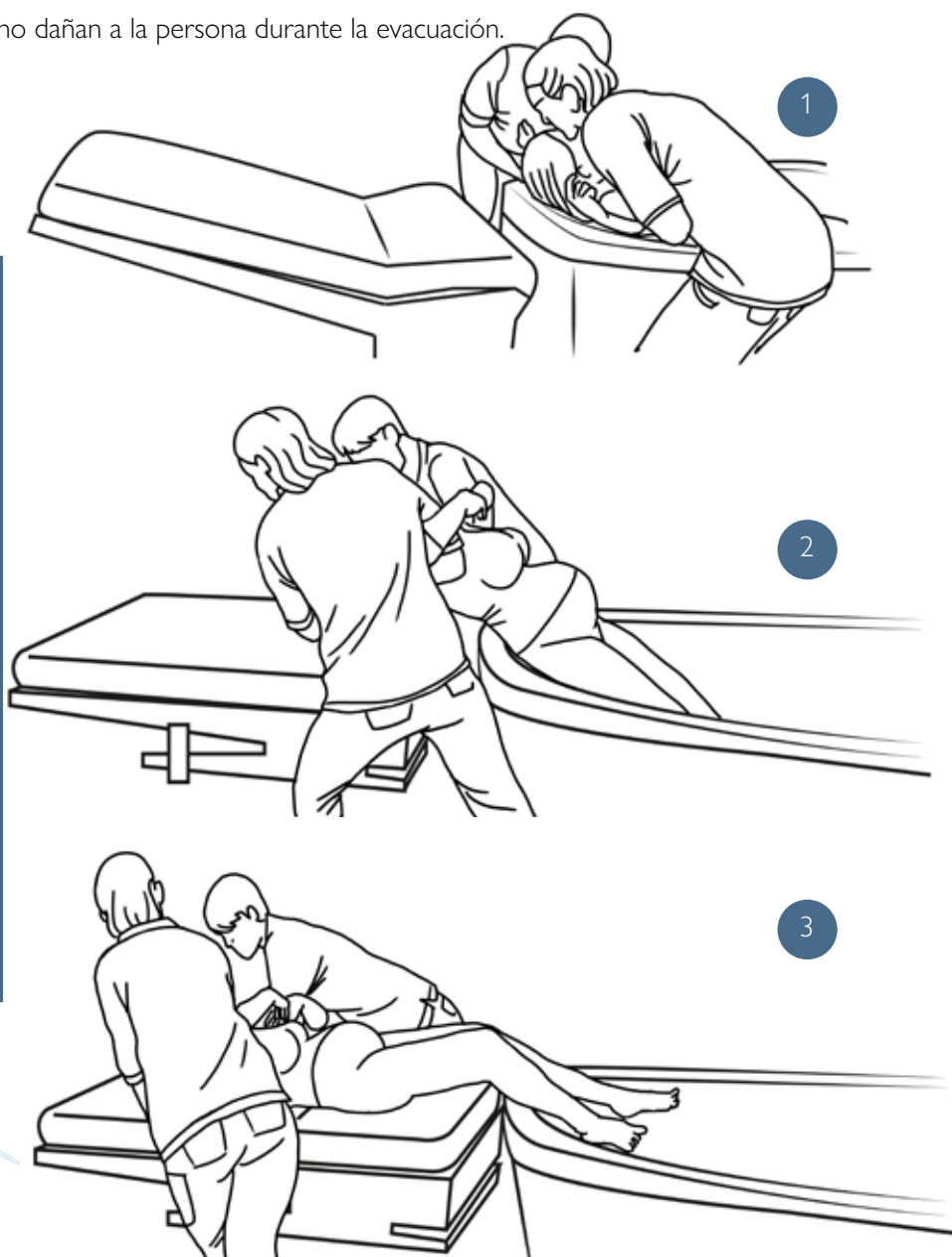

IR MÁS ALLÁ PARA CONSEGUIR UNA EXCELENTE HIGIENE

La bañera de nacimiento con válvula antirretorno y filtro de legionela opcional. Se ha desarrollado una bañera de nacimiento con un enfoque en minimizar el agua de baño contaminada

Con una bañera de nacimiento FJORDBLINK®, no tiene que preocuparse de que el agua contaminada vuelva a fluir desde el desagüe hacia la bañera de nacimiento.

Hemos incorporado una válvula antirretorno en la bañera de parto y en la columna de suministro para evitarlo. De este modo, puede rellenar con seguridad con agua limpia y caliente durante el parto sin el riesgo de que se produzca un reflujo de agua sucia.

Para mayor seguridad, puede adquirir un filtro de legionela integrado para la columna de suministro que elimina las bacterias de legionela del agua que se introduce en la bañera de parto a través de la columna de suministro. En general, las infecciones que dañan a la persona que da a luz o al bebé causadas por patógenos en el agua del baño son, afortunadamente, poco frecuentes si se mantienen unas normas de higiene adecuadas durante los partos en el agua.



- No hay riesgo de reflujo de agua contaminada
- Posibilidad de filtrar la legionela
- El desagüe se puede desinfectar
- Una superficie intacta y, por tanto, fácil y segura de limpiar

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SENCILLA Y SEGURA

Puede sentirse seguro utilizando este producto

La bañera de nacimiento está moldeada en acrílico médico resistente reforzado con fibra de vidrio. La superficie de la bañera de nacimiento es resistente a los desinfectantes y fácil de limpiar.

La superficie de la bañera de nacimiento es completa y no está rota por piezas montadas, por lo que se puede limpiar de forma fácil y segura.

Una vez que haya adquirido una bañera de partos FJORDBLINK®, estaremos encantados de guiarle en el proceso de limpieza recomendado que mejor se adapte a su maternidad o clínica de maternidad.

Todos los elementos desmontables de la columna de suministro pueden desmontarse y desinfectarse en una lavadora industrial o en un autoclave.

Las piezas desmontables, como las mangueras de suministro de agua, la ducha de mano, el llenado rápido y la manguera de desagüe, están equipadas con un sistema de conexión rápida que puede accionarse sin necesidad de utilizar herramientas. Por lo tanto, las piezas pueden desmontarse fácilmente a mano.




El sistema de conexión rápida garantiza que las piezas desmontables, como:

- Mangueras de suministro de agua
- Manguera de desagüe
- Ducha de mano
- Relleno rápido

...se desmontan fácilmente sin necesidad de utilizar



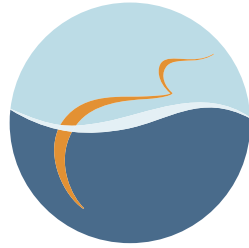

FJORDBLINK

Welcoming Water



Grafik og produktion: www.graphiareklame.dk

DATOS

FJORDBLINK® Medical ha desarrollado, en colaboración con matronas danesas, la piscina de parto FJORDBLINK®, que le ofrece la posibilidad de apoyar un parto seguro en el agua. La piscina se ha utilizado con buenos resultados durante más de dos décadas en varios países.